

Инструкция по использованию вакуумных пробирок и контейнеров для взятия мочи

Для получения достоверных результатов исследования мочи, а также для исключения контакта мед. персонала с материалом, необходимо соблюдать правила забора мочи и перемещения образца в вакуумную пробирку для проведения последующего анализа.

Порядок работы:




Откройте крышку контейнера, повернув ее против часовой стрелки.



Положите крышку на внешнюю сторону на чистую поверхность (устройством для взятия мочи вверх).



Не прикасайтесь к внутренней поверхности контейнера и крышки.

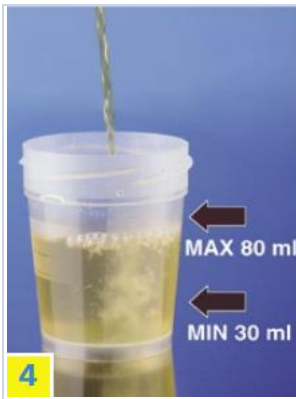

Пациенту необходимо собрать мочу. Контейнер должен быть наполнен не более чем на 3/4 от его объема. Минимальный объем мочи для анализа – 30 мл, максимальный – 80 мл.



Закройте контейнер крышкой, повернув ее по часовой стрелке.



Аккуратно перемешайте содержимое контейнера, перед тем как взять пробу.



Приподнимите защитную этикетку (не снимайте этикетку полностью).



Вставьте пробирку в углубление в крышке. Осторожно надавите на нее. Удерживайте пробирку погруженной в углубление, пока она не заполнится.



Извлеките пробирку и приклейте защитную этикетку обратно на крышку.



Осторожно перемешайте пробу (если набрана пробирка со стабилизатором), перевернув пробирку 8-10 раз.